

Ablauf des Selbsttests

- Verfallsdatum prüfen
- Anzeige des Trockenmittels muss gelb sein
- alle Kinder öffnen das Röhrchen
- alle Kinder stecken es in das „Holzklötzchen“
- Gruppe 1 nimmt das Stäbchen aus der Verpackung
- Gruppe 1 nimmt die Maske runter und beginnt mit dem Abstrich in der Nase (15 Sekunden lang in jedem Nasenloch gegen die Nasenwand drehen) Zuschauer zählen mit...
- Stäbchen in das Röhrchen stellen
- Maske hoch
- Röhrchen aus dem Klötzchen nehmen und im unteren Bereich leicht zusammendrücken
- min. 10 mal hin und her drehen
- Röhrchen zusammendrücken und das Stäbchen herausziehen, sodass möglichst viel der Flüssigkeit im Röhrchen bleibt
- Röhrchen fest mit der Spenderkappe verschließen
- Gr.2 Maske runter...

...gleicher Ablauf...

- alle Kinder tropfen 4 Tropfen auf das Feld (5 sind auch nicht schlimm)
- Stoppuhr wird gestellt und die Kinder kommen nacheinander nach vorne und legen ihren Teststreifen auf „ihren“ Ablageort
- Kinder räumen alle Utensilien in den dafür vorgesehenen Mülleimer und waschen die Hände!
- Lehrer lesen die Ergebnisse ab und leiten evtl. weitere Schritte ein
- Dokumentationsbogen ausfüllen, NUR positive Kinder benennen